

COVID-19 (SARS-CoV-2) TEST ANTICORPALE

Per la rilevazione e differenziazione degli anticorpi
IgG e IgM contro il Nuovo Coronavirus (Sars-CoV-2)



LEPU MEDICAL



ACCURATO

Elevata purezza degli
anticorpi per risultati precisi




RAPIDO

Risultati disponibili in 15
minuti



MINI-INVASIVO

Eseguibile con sangue
capillare

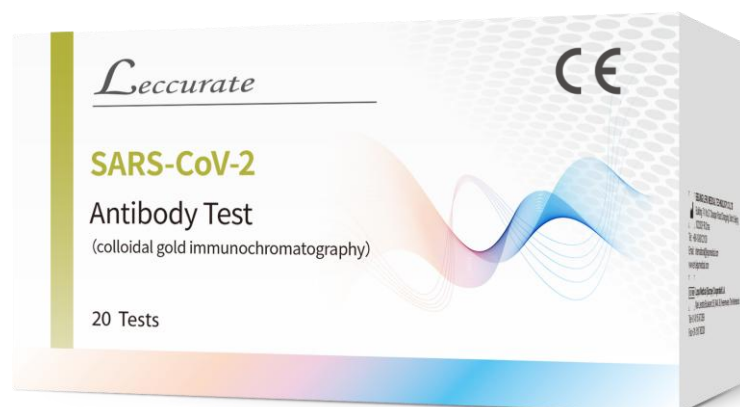



[Tipo di campione] Sangue intero/Siero/Plasma

[Volume Campione] 20ul / 10ul / 10ul

[Tempo di reazione] 15 mins

[Test per confezione] 20 tests per box


[Conservazione] 4 °C ~ 30°C

[Tecnica utilizzata] Immunocromatografia con oro colloidale

[Specificità diagnostica]* 97,6%

[Sensibilità diagnostica]* 98,9%


*testate su un campione di 220 individui

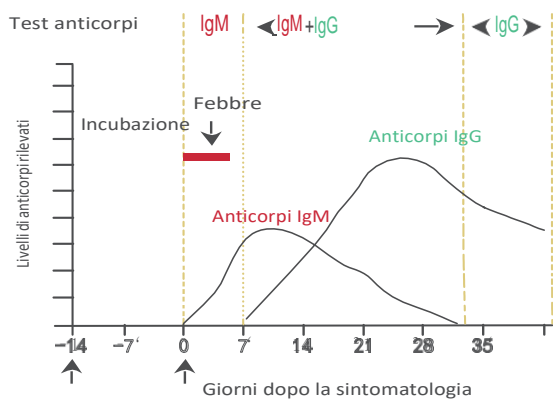


Gli anticorpi vengono secreti in seguito all'interazione con l'agente patogeno. Le immunoglobuline M (IgM) si sviluppano prima, fornendo una risposta primaria all'infezione. Le immunoglobuline G (IgG) si sviluppano in seguito, manifestando una reazione più forte e specifica contro il virus.

Procedura del test


Step 1 Aggiungere 20ul di sangue capillare o 10ul di siero/plasma nel pozzetto A.

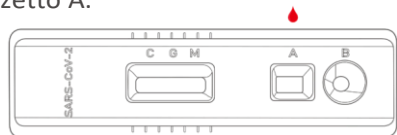

Step 2 Aggiungere 2 gocce di diluente nel pozzetto B ed avviare il timer.

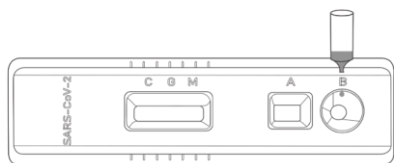

Step 3 Il risultato deve essere letto dopo 15-20 minuti. Non leggere il risultato dopo 30 minuti.

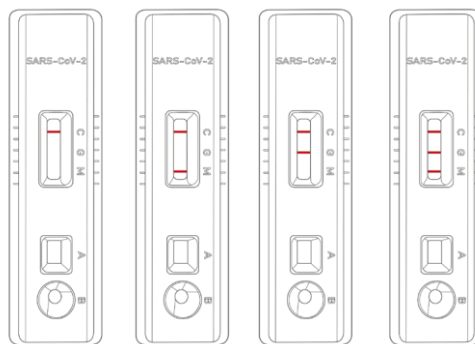

Negativo

IgM Positive


IgG Positive

IgM/IgG Positive

M : linea rilevamento IgM

G : linea rilevamento IgG

C : linea controllo qualità

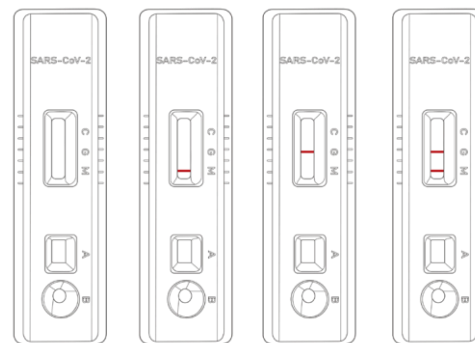

Invalid

Invalid

Invalid

Invalid

CORIS MEDICA SRL

Sede operativa Cortona (AR) N.a. Ossaia n. 39/A - Tel. 0575/67681 Fax 0575/679469 info@corismedica.it

Produttore: Lepu Medical Technology (Beijing) Co., Ltd.